

メディア・ユニバーサル  
デザインコンペティション  
経済産業大臣賞  
受賞

# AED 使用時 傷病者保護シート

勇気のあるバイスタンダー（その場に居合せた人）を補助するシートです。  
救急隊が到着するまで「救命」を最優先し「悪化防止」「苦痛の軽減」等応急手当を行い、  
AED 使用時には効果的にお使い頂けます。

**AED 使用時**  
**傷病者保護シート**

心肺停止時に図の手順で AED を使用してください。  
善悪で行った「心肺蘇生」や「AED の使用」の責任を問われる  
事はありません。

心肺マッサージ（胸骨圧迫）は絶やさず続け、音声に従ってください

① 倒れている人の意識を確認  
② 呼吸を見る (10 秒)  
③ 心肺マッサージ (100 回/分 30 回 1 セット)  
④ AED 本体上部の電源 ON (機種により異なる)  
⑤ パッドを押しつけるように貼る (心臓をささめ込む)  
⑥ 解析中は傷病者から離れて離れない  
⑦ 電気ショックが必要な時ボタンを押す  
⑧ 心肺マッサージを 2 分以上続ける

6~8 を繰り返します

子供の簡易搬送シートとしてもお使い頂けます  
身長 140cm 位まで

- シートを三つ折りにします
- 上半身を中心に畳めます
- 頭を折り折り広げます
- 頭を上にし、足を引かない様にします

簡易搬送シートとして使用する時は、シートから頭が飛び出さない位置に固定します。頭は足よりも高い位置で搬送を行ってください。

AED は機械の音声に従い操作します。周囲や患者の体が離れたくない事を確認し、電気ショック時は距離から離れてください。

Position  
位置

Indication  
指示

Position  
位置

Indication  
指示

1 Check the victim's response and air way.  
2 Check the victim's breathing.  
3 Start CPR (100 breaths / 30 times).  
4 Turn on the AED on the top.  
5 Apply pads to the chest (cover the heart).  
6 During AED to analyze the heart rhythm, the AED push the shock button. CPR more than 2 minutes.  
7 If a shock is advised, the patient is safe to receive a shock.  
8 Repeat 6~8 over again.

1 Check the victim's response and air way.  
2 Check the victim's breathing.  
3 Start CPR (100 breaths / 30 times).  
4 Turn on the AED on the top.  
5 Apply pads to the chest (cover the heart).  
6 During AED to analyze the heart rhythm, the AED push the shock button. CPR more than 2 minutes.  
7 If a shock is advised, the patient is safe to receive a shock.  
8 Repeat 6~8 over again.



**早期除細動**

**救命連鎖**

**人の下に敷き使用します**

機械の音声の指示と併用して使用する事で、脳内整理が出来落ち着いた心肺蘇生が望めます。

品名 / 傷病者保護シート  
材質 / 本体：不織布（ポリエチレンテレフタレート）  
袋：PP  
サイズ / (約) 914×1800mm  
※製品は予告なく、デザイン・使用が変更になる場合があります  
141000

販売元 / 全日本印刷工業組合連合会  
東京都中央区新富 1-16-8 日本印刷会館  
03-3552-4571  
製造元 / 株式会社 長英  
東京都江東区森下 3-4-3  
意匠登録出願中 意願 2014-011510

